

Guide de l'utilisateur UPEASY Power Seat

Consignes de sécurité

1. N'utilisez le siège de levage UPEASY Power Seat que dans les fauteuils et les sofas qui possèdent au moins un accoudoir pour assurer la stabilité maximale lorsque vous vous asseyez ou vous levez.
2. Normalement, vous ne devez pas utiliser le siège UPEASY Power Seat dans les berceuses, les fauteuils roulants, les fauteuils de bureau ou toute chaise dotée de roues. Il est interdit de l'utiliser dans les véhicules automobiles.
3. Comme pour tout appareil électrique, vous ne devez pas utiliser le siège UPEASY Power Seat dans l'eau ou près de celle-ci.



Veillez consulter la section réservée aux Consignes de sécurité pour plus de détails.



By Uplift Technologies Inc.

Avis de non-responsabilité

Les consignes et les recommandations sur l'utilisation convenable et sans danger sont exposées dans le présent Guide de l'utilisateur. Uplift Technologies Inc. n'est pas responsable des dommages matériels ou des préjudices personnels susceptibles d'être provoqués par l'utilisation imprudente ou inadéquate du siège UPEASY Power Seat. Uplift Technologies Inc. n'est pas responsable des préjudices et/ou dommages qui découlent du mauvais jugement et/ou bon sens quant à l'utilisation du produit.

Si vous éprouvez des difficultés à utiliser votre siège UPEASY Power Seat, ou si vous ne vous sentez pas capable d'en profiter aisément en toute sécurité, veuillez communiquer avec votre distributeur pour obtenir de l'aide.

Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité et les conseils ci-après vous aideront à utiliser sans danger votre siège UPEASY Power Seat. Veuillez les suivre attentivement pour éviter tout préjudice personnel.

- Comme pour tout appareil électrique, vous ne devez pas utiliser le siège UPEASY Power Seat dans l'eau ou près de celle-ci.
- N'utilisez pas le siège si le cordon d'alimentation a été endommagé.
- Évitez de saisir le côté du siège lorsque vous l'utilisez. Gardez les doigts à l'écart du mécanisme de levage.
- Débranchez votre siège UPEASY Power Seat avant d'effectuer toute inspection électrique.
- N'essayez pas de corriger vous-même des problèmes électriques, car cela aura pour effet d'annuler la garantie du produit.
- Vous devez tenir les enfants et les animaux familiers à l'écart du siège UPEASY Power Seat pendant son fonctionnement.
- Vous devez éviter que le tissu du siège n'entre en contact direct avec une source quelconque de chaleur, car un préjudice personnel ou un dommage causé par le feu peut se produire.
- N'utilisez le siège UPEASY Power Seat que dans les chaises et les sofas qui possèdent au moins un accoudoir pour assurer la stabilité maximale lorsque vous vous asseyez ou vous levez.
- Normalement, vous ne devez pas utiliser le siège dans les berceuses, les fauteuils roulants, les fauteuils de bureau ou toute chaise dotée de roues.
- L'utilisation du siège UPEASY Power Seat est interdite dans les véhicules automobiles.
- L'utilisation du siège est interdite dans la salle de bain.
- Vous devez consulter votre médecin pour assurer que vous ne souffrez d'aucune limitation physique ou que vous ne prenez aucun médicament qui soit en conflit avec l'utilisation sécuritaire du siège UPEASY Power Seat.

Bienvenue aux utilisateurs du siège UPEASY Power Seat

Merci d'avoir acheté le siège UPEASY Power Seat. Ce siège a été conçu pour vous fournir le dernier cri en matière de confort et de commodité. Si vous l'utilisez convenablement et en prenez un bon soin, ce siège devrait vous offrir une aide à la mobilité sans problème pendant de nombreuses années.

Pour les consignes sur l'assemblage convenable et la bonne utilisation de votre siège UPEASY Power Seat, veuillez lire l'intégralité de ce guide. Pour de plus amples renseignements sur la gamme des sièges de levage UPEASY, visitez notre site Web dont l'URL est www.upeasy.com

Avantages du siège
Le siège UPEASY Power Seat est vraiment la solution abordable pour remplacer une chaise de levage ou un accessoire portable par tous ceux qui en possèdent déjà un. Le siège UPEASY Power Seat intègre une poignée et est facile à transporter d'un endroit à l'autre.

Ce siège de levage s'adapte aux meubles que vous possédez déjà et assure un levage intégral (100 %) des personnes qui pèsent jusqu'à 300 livres (136 kg).



Spécifications

Homologation CSA et C/US

Brevet américain n° 6,702,383 et n° 5,316,370.

D'autres brevets américains, européens et internationaux sont en instance.

Dimensions du siège :

Longueur : 19 po/48 cm

Largeur : 16 po/41 cm

Revêtement : 100 % de polyester

Hauteur du siège :

Position soulevée : 10 po/25 cm

Position de repos : 2 po/5 cm

Poids :

12 livres/5,4 kg

Capacité :

Pour les utilisateurs qui pèsent jusqu'à 300 livres/136 kg.

Alimentation électrique :

120 V c.a., 60 Hz sous 0,6 A

Cordon d'alimentation :

10 pi/3,0 m



- le siège UPEASY Power Seat (en position de repos) et son cordon d'alimentation;
- deux leviers de commande;
- le présent Guide de l'utilisateur et votre Carte officielle de garantie.

Veillez vous assurer que toutes les pièces sont incluses dans votre paquet. Communiquez avec votre distributeur si des pièces du produit font défaut ou sont endommagées. Postez votre Carte officielle de garantie pour assurer que vous y êtes enregistré.

Assemblage et essais

Pour assurer le bon fonctionnement du siège et empêcher tout choc électrique, vous devez suivre les instructions suivantes de montage.

1. Placez votre siège de levage sur une chaise convenable.
2. Insérez le ou les leviers de commande dans les fourchons en acier de chaque côté du siège à l'avant. Inclinez les leviers vers l'avant selon l'illustration ci-après. Les leviers s'assujettissent facilement.



Précautions précédant votre utilisation du siège UPEASY Power Seat

Avant d'utiliser votre siège UPEASY Power Seat :

1. Vérifiez le contenu du paquet pour vous assurer que tous les composants y sont inclus et sont en bon état (voir l'illustration ci-après).
2. Testez le siège de levage pour vous assurer qu'il est en bon état.

Vérifiez le contenu du paquet
Votre produit UPEASY Power Seat est livré avec les composants ci-après :

3. Enfichez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur de puissance.
4. Testez votre siège UPEASY Power Seat avant de l'utiliser pour vous assurer qu'il fonctionne convenablement. Les leviers de commande présentent trois positions de fonctionnement : haut, bas, arrêt. Nous vous recommandons de les apprivoiser avant d'utiliser votre siège de levage.

Soulevez doucement un des leviers de commande pour lever le siège. Sélectionnez la position milieu pour l'arrêt. Appuyez vers le bas pour faire descendre le siège.

Note : votre siège UPEASY Power Seat s'arrête aussi de façon automatique lorsqu'il atteint sa hauteur maximale, et lorsqu'il est complètement abaissé, sauf si vous placez le levier de commande sur la position d'arrêt.

Utilisation de votre siège UPEASY Power Seat

Dans cette section, nous présentons le mode d'utilisation sécuritaire de votre siège UPEASY Power Seat.

Sélection des chaises convenables
Vous pouvez utiliser le siège UPEASY Power Seat dans la plupart des chaises, des fauteuils inclinables et des sofas, mais toujours près d'un accoudoir. Il faut en effet assurer la stabilité maximale lorsque vous utilisez le siège UPEASY Power Seat. Nous recommandons aussi que la chaise et le sofa sur lesquels vous utilisez le siège comportent une surface d'appui suffisamment stable.

Préparation à l'emploi
Lorsque vous placez votre siège UPEASY Power Seat sur votre chaise ou votre sofa, le ou les leviers de commande doivent pointer vers l'avant et ne présenter aucune obstruction. De plus, le cordon ne doit pas être sous la base du siège pour éviter tout dommage ou débranchement. Enfin, assurez-vous que le cordon est protégé afin que personne ne puisse marcher dessus.

Votre siège UPEASY Power Seat ajoutera deux pouces (2 po/5 cm) à la hauteur de votre chaise, fauteuil inclinable ou sofa lorsque vous êtes assis. Pour utiliser votre siège UPEASY Power Seat en toute sécurité, vous devez assurer que vos deux pieds touchent le sol en tout temps.



Il est possible d'assurer de trois manières que les pieds touchent le sol en tout temps pendant l'utilisation du siège :

- (1) À l'aide de la position d'arrêt du levier de commande, réglez la hauteur du siège UPEASY Power Seat. En position de levage, il vous suffit d'arrêter le siège au point où vous pouvez quitter aisément votre chaise avec les deux pieds au sol. Lorsque vous vous rassoirez, votre siège UPEASY Power Seat sera positionné à la hauteur idéale pour en jouir parfaitement.
- (2) Si le coussin de la chaise ou du sofa est rétractable, essayez d'utiliser votre siège UPEASY Power Seat sans le coussin, ou remplacez-le par un coussin plus bas.
- (3) Réduisez la hauteur de la chaise ou du sofa en dégraissant les pieds pour que vos pieds touchent le sol.

Évidemment, comme la méthode (1) exige le moins de peine et d'effort, essayez-la en premier lieu. À présent que votre siège UPEASY Power Seat est placé dans votre chaise ou votre sofa, levez doucement un des leviers de commande et soulevez le siège jusqu'à une hauteur qui vous permette de vous asseoir tout en gardant les pieds au sol. Arrêtez le mouvement lorsque le siège atteint la hauteur convenable, en appuyant doucement vers le bas sur la position d'arrêt du levier de commande.



Votre siège UPEASY Power Seat est maintenant prêt à l'emploi!

Note : Si vous devez faire un petit saut pour atteindre le siège UPEASY Power Seat, c'est qu'il est trop haut. Il vous suffit de l'abaisser pour que vous puissiez vous y asseoir avec les deux pieds sur le sol.



Mode d'emploi

Lorsque vous utilisez votre siège UPEASY Power Seat, gardez au moins une main sur l'accoudoir de votre chaise ou votre sofa pour assurer la stabilité.

Il vous suffit d'utiliser un seul des leviers de commande pour soulever ou abaisser le siège.

Mouvement vers le bas – Position assise

Note : votre siège UPEASY Power Seat doit être dans la position supérieure.

- En tournant le dos à la chaise, placez la ou les mains sur le ou les accoudoirs de la chaise ou du sofa.
- Assoyez-vous sur le siège soulevé en gardant les deux pieds sur le sol.
- Appuyez sur un des leviers vers le bas – au-delà de la position d'arrêt – et lâchez-le.
- Le moteur provoquera la descente du siège de levage et s'arrêtera automatiquement lorsque ce dernier atteindra sa pleine position inférieure, sauf si vous choisissez de l'arrêter vous-même.

Note : veuillez vous rappeler qu'il n'est ni nécessaire ni conseillé de continuer à appuyer sur le levier ou à le tirer une fois que le moteur a été lancé.



Abaissement du siège de levage
Pour abaisser le siège à la position assise, poussez doucement vers le bas le levier de commande.



Soulèvement du siège de levage
Pour soulever le siège depuis sa position inférieure, tirez vers le haut le levier de manœuvre.

Position debout depuis la position assise

- Placez votre ou vos mains sur l'accoudoir ou les accoudoirs de la chaise ou du sofa, et assurez-vous que vos deux pieds touchent le sol.
- Cliquez sur un des leviers vers le haut – au-delà de la position d'arrêt – et lâchez-le.
- Le moteur soulèvera le siège de levage et s'arrêtera automatiquement lorsqu'il atteindra sa pleine position supérieure, sauf si vous choisissez de l'arrêter vous-même.



Utilisation de la position d'arrêt

Vous pouvez utiliser la position (centrale) d'arrêt sur le levier de commande pour arrêter votre siège UPEASY Power Seat en tout temps. Les deux options suivantes sont également possibles :

- Lorsque le siège monte, si vous avez atteint la hauteur voulue;
- À tout moment où vous jugez nécessaire de maintenir votre stabilité.

Traitement et entretien

Veillez lire attentivement les instructions suivantes pour assurer le traitement et l'entretien convenables de votre siège UPEASY Power Seat.

Entretien facile

Votre siège UPEASY Power Seat est livré avec un revêtement lavable à la machine. La surface de la mousse est également revêtue d'une pellicule imperméable pour en permettre un traitement facile.

Pour assurer un traitement convenable, veuillez suivre ces instructions :

- Essuyez immédiatement tout déversement sur le revêtement.
- Retirez le revêtement pour le lavage ou pour nettoyer la surface du siège en mousse.
- Lavez à la machine votre revêtement de tissu à l'eau **froide** et **accrochez-le pour sécher**.
- Essuyez la surface du siège en mousse à l'aide d'une éponge humide (nous vous recommandons d'utiliser des détergents et agents nettoyants doux).

Inspection des composants électriques

Nous vous recommandons d'effectuer des contrôles de routine sur votre siège UPEASY Power Seat pour en assurer un fonctionnement sans problème pendant des années. Inspectez à l'œil nu le cordon d'alimentation afin d'y déceler toute fissure ou usure.

Si vous décelez un problème dans un composant du circuit électrique, communiquez immédiatement avec votre fournisseur autorisé UPEASY Power Seat.

N'essayez pas de corriger vous-même un problème électrique.

Note : si vous essayez de réparer un composant électrique, vous pouvez subir un préjudice personnel et annuler la garantie.

Dépannage

Que dois-je faire si mon siège UPEASY Power Seat ne fonctionne pas du tout lorsque je tire sur le levier ou que j'appuie dessus?

- Assurez-vous d'abord que le levier est solidement installé. Vous devez entendre un déclic lorsqu'il est inséré sur le fourchon en acier situé à la base. Il ne doit pas sortir lorsque vous le tirez doucement.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est solidement branché dans la prise murale convenablement câblée.
- Si les mesures ci-dessus échouent, vérifiez votre boîtier de disjoncteurs en dernière extrémité avant de conclure que le produit présente un problème.

Comment puis-je trouver le numéro de série de mon siège de levage?

Le numéro de série est un nombre à 10 chiffres inscrit sur un étroit autocollant blanc situé à la base du siège.

Que dois-je faire si j'éprouve des difficultés à installer ou à utiliser mon siège UPEASY Power Seat?

Vous devez d'abord lire attentivement les instructions afin de vous assurer que votre siège de levage a été installé convenablement. Si vous avez toujours des difficultés, ou que vous ne vous sentez pas capable d'utiliser ce siège de levage en toute sécurité, veuillez communiquer avec votre distributeur autorisé UPEASY Power Seat pour obtenir de l'aide.

Positionnements correct et incorrect



Utilisation convenable : les deux pieds sur le sol
Avant de vous asseoir, assurez-vous que le siège UPEASY Power Seat est à la hauteur idéale qui vous permet de vous asseoir avec les pieds au contact du sol. Gardez au moins une main sur un accoudoir en guise de soutien pendant que vous abaissez le siège.



Utilisation incorrecte : siège trop haut
Si votre siège UPEASY Power Seat est trop haut, vous pourrez difficilement vous asseoir sans devoir sauter sur le siège. Pour assurer la stabilité du produit, et réduire tout risque de chute, abaissez le siège à une hauteur qui vous permet de poser les deux pieds au sol.



Utilisation incorrecte : position assise de travers
Si votre siège UPEASY Power Seat est bien positionné, vous devez vous asseoir normalement dessus et garder les pieds au sol. Si vous trouvez que vous penchez d'un côté ou de l'autre sur le siège, c'est qu'il est trop haut pour vous, et vous risquez de tomber ou d'endommager le produit. Abaissez alors le siège à la hauteur convenable avant de l'utiliser.



Utilisation incorrecte – Force excessive sur les leviers de commande
Les leviers de commande nécessitent une force minimale pour assurer le mouvement vertical du siège. Si vous exercez une force excessive sur les leviers, cela est inutile et risque même de provoquer la rupture des leviers.

Guide de l'utilisateur UPEASY Power Seat

Retours sous garantie

Si votre siège UPEASY Power Seat ne fonctionne pas selon les dispositions de la garantie, communiquez avec le distributeur d'origine pour obtenir de l'aide. Vous serez tenu de fournir la date et une preuve d'achat.

Nous encourageons tous les distributeurs à honorer les garanties des clients qui ont acheté les sièges UPEASY Power Seat afin d'éviter tout délai lié à la réception des unités de rechange.

Note importante :

Aucun retour ne sera accepté sans présentation d'un numéro d'autorisation de retour (NAR). Veuillez demander à votre distributeur de composer le numéro 1 800 387- 0896 pour obtenir votre NAR.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser le carton et le matériel d'emballage d'origine pour tous les retours sous garantie. Ces éléments ont été conçus pour surmonter le processus d'expédition. Si le siège UPEASY Power Seat subit un dommage lié à un mauvais emballage, le coût de réparation vous sera imputé.



Bringing quality to life.

www.upeasy.com

1-800-387-0896

Garantie

Uplift Technologies Inc. garantit votre siège UPEASY Power Seat contre toute défaillance du produit pendant un an à compter de la date d'achat. Les dommages liés à un abus ne sont pas garantis, et cette garantie ne peut être transmise à quiconque.

Si votre siège UPEASY Power Seat présente un vice de matériau ou de fabrication, Uplift Technologies Inc. devra, à sa convenance, soit réparer ou remplacer votre siège UPEASY Power Seat pendant toute la période de un an, sans frais, sauf les coûts d'expédition courants.

Cette garantie est nulle si le produit a été modifié par l'adjonction de pièces ou d'accessoires non autorisés.

NOTE : pour assurer que les informations sur votre garantie sont en notre possession, veuillez remplir et renvoyer aujourd'hui votre carte officielle de garantie.